

Datenblattnummer : **Sonozorb M-N „SONO MN“**

Produktbeschreibung : Zweilagiger Mundschutz mit Gummibändern und außen liegendem Nasenbügel zum Zusammenbauen (s. separate Anleitung).

Verwendung : Für medizinisches (oder vergleichbares) Personal.
Nicht für die Anwendung bei invasiven Eingriffen!
Nicht für die Behandlung von Patienten mit Verdacht oder gesicherter Diagnose auf COVID 19!

Physikalische Eigenschaften

Außenschicht : 100 % PP Meltblown
Innenschicht : 100 % PP Spunbond

Farbe : weiß
Dicke : ca. 2 mm

Sicherheitsinformationen

Das Material ist nicht steril.

Nicht wieder verwenden. Eine erneute Verwendung kann eine akute oder chronische Infektion hervorrufen.

Muss bei einem Patientenwechsel ausgetauscht werden.

Bitte austauschen falls das Produkt augenscheinlich beschädigt oder feucht ist!

Der Mundschutz kann einmalig bei 70 °C und 5 Min. erhitzt werden.

Lagerung

Lagertemperatur : Bei Raumtemperatur in einem trockenen, belüfteten Raum lagern

Lagerzeit : max. 12 Monate

Stand 27. März 2020

Zu Beachten :

Dieses Produkt hat eine Sonderzulassung gemäß §11 Abs. 1 des MPG. Ein CE-Kennzeichen ist nicht erteilt.
Die Zulassung ist befristet bis zum 31. Juli 2020.