

Zusammenbauanleitung für SONO MN Schutzmasken

Anleitung für Variante mit 7 Löchern je Seite


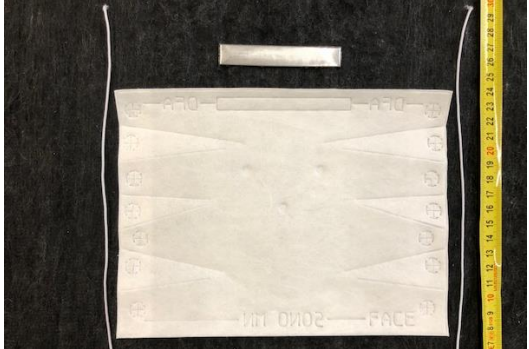
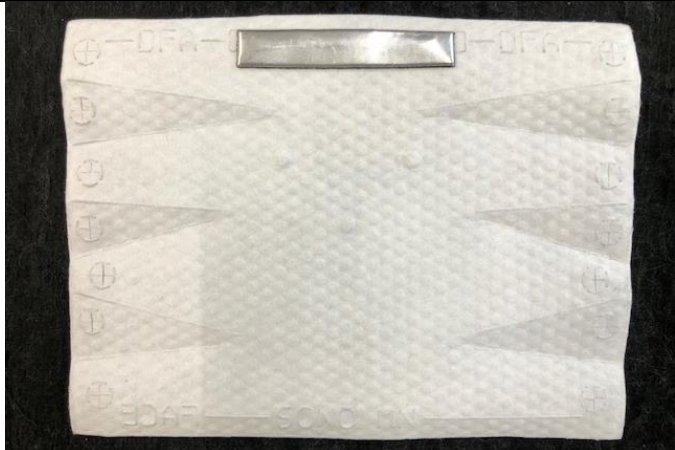

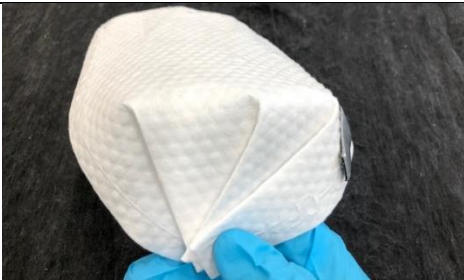
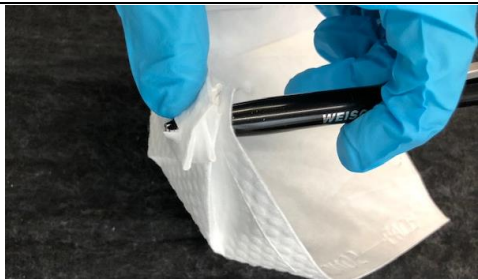
Stand: 12.05.2020


1 Karton enthält:

- Mind. 1000 Filtermedien
- Mind. 1000 Nasenclips
- Mind. 500 Gummibänder je ca. 120 cm lang

Vor dem Zusammenbau der Masken die Hände gründlich waschen und trocknen.

Der Zusammenbau erfolgt nach folgendem Schema:

1. Material zuschneiden	2. Material bereitlegen
	
<p>Schneiden Sie aus dem ca. 120 cm langen Gummiband mit 3 Schnitten 4 Stränge gleicher Länge.</p>	<p>Sie benötigen pro Maske: 1x Filtermedium, 1x Nasenklammer, 2x Gummibänder je ca. 25-30 cm</p>
3. Nasenklammer aufkleben	4. Seitenteile falten
	
<p>1 Nasenklammer auf das Filtermedium aufkleben. Wichtig: Noppige Fläche nach oben, SONO MN ist lesbar (nicht spiegelverkehrt). Platzierung Nasenklammer: mittig oben im rechteckig geprägten Bereich.</p>	<p>Falten Sie die Maske an den seitlichen Falzhilfen jeweils so, dass alle 7 Löcher übereinander liegen (Ansicht mit Nasenklammer rechts). Die längere Falzung wird auf die kürzere gelegt (innen gut erkennbar).</p>
5. Resultat: gefaltete Seitenteile	6. Löcher vorbereiten
	
<p>Das Bild zeigt die fertig gefaltete Seitenpartie (Ansicht mit Nasenklammer rechts). Ein Hinweis zur Größenanpassung am Ende dieser Anleitung.</p>	<p>Um das Durchfädeln des Bands zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Löcher mit der Spitze eines Stiftes zu weiten.</p>

8. Gummiband einfädeln	9. Verknoten des Gummibands
	
<p>Ziehen Sie das vorbereitete Gummiband durch die 7 Löcher. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Maske.</p>	<p>Verbinden Sie das Gummiband an den beiden offenen Enden. Hiermit erzeugen Sie eine Schlaufe für die Fixierung hinter Ihrem Ohr. Die Länge der Schlaufen sollten Sie Ihren individuellen Gesichtsmaßen anpassen.</p>

Eine Video-Anleitung für den Zusammenbau der Maske sowie das Datenblatt finden Sie auf unserer Website: <https://www.dfabielefeld.de/leistungen/>

Größen-Anpassung: Durch verschiedene Kopfformen und -Größen empfindet jeder Träger eine andere Trage-Variante als komfortabel. Sollte die Maske bei Ihnen nicht optimal sitzen, versuchen Sie diese Alternative:

Seitenteile falten	Gummiband einfädeln
	
<p>Falten Sie die Maske an den seitlichen Falzhilfen, jedoch lassen Sie das mittlere Loch frei (nur oben und unten falten).</p>	<p>Fädeln Sie jeweils oben und unten von außen das Gummiband ein. Hierdurch entsteht eine Schlaufe zur Befestigung der Maske hinter Ihren Ohren.</p>

Hinterkopf-Tragevariante: Wer die Maske statt hinter den Ohren auf dem Hinterkopf tragen möchte, der kann die zwei Gummibänder zu einem Band verknoten. Die losen Enden des Gummibands werden Links und Rechts mit den zusammengerafften Seitenteilen der Maske eng verknotet.

Gummiband mit Raffung verknoten	Fertige Maske
