

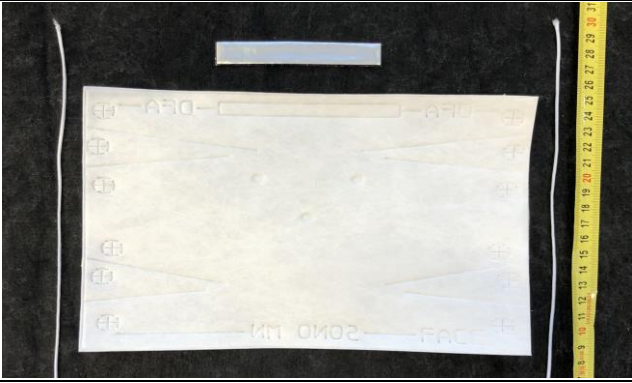
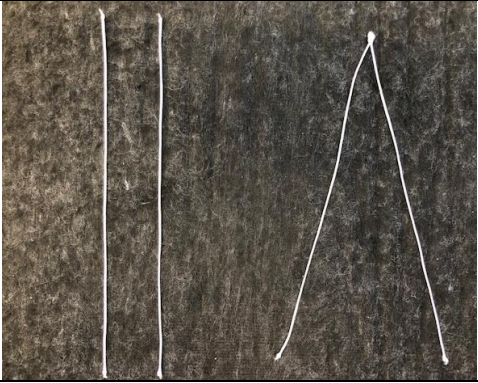

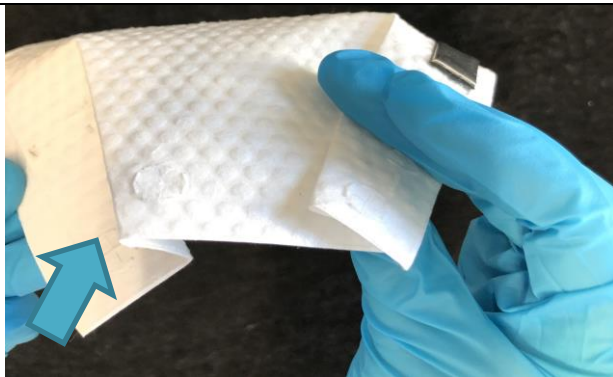
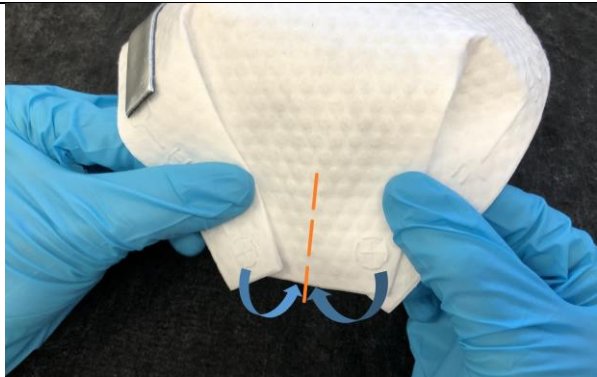
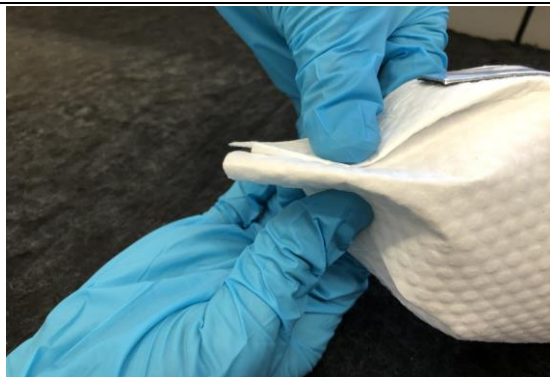
Zusammenbauanleitung für SONO MN Schutzmasken

Anleitung für Variante mit 6 Löchern je Seite

Tragevariante Hinterkopf

Stand: 06.05.2020

Wer die Maske statt hinter den Ohren auf dem Hinterkopf tragen möchte, der baut die Maske wie folgt zusammen:

1. Material bereitlegen	2. Gummibänder verknoten
	
Sie benötigen pro Maske: 1x Filtermedium, 1x Nasenklammer, 1x Gummiband mit einer Länge von 55-60 cm.	Falls Sie bereits Gummibänder für die Hinter-Ohr-Variante zugeschnitten haben, verknoten Sie einfach zwei Bänder miteinander. Ist dies nicht der Fall, schneiden Sie das ca. 120 cm lange Band in der Hälfte durch.
3. Nasenklammer aufkleben	4. Seitenteile falten
	
1 Nasenklammer auf das Filtermedium aufkleben. Wichtig: Noppige Fläche nach oben, SONO MN ist lesbar (nicht spiegelverkehrt). Platzierung Nasenklammer: mittig oben im rechteckig geprägten Bereich.	Falten Sie die Maske an den seitlichen Falzhilfen so, dass oben und unten 3 Lagen und Löcher übereinander liegen. Die längere Falzung wird auf die kürzere gelegt (innen gut erkennbar).
5. Zusätzliche Faltung	
	
Falten Sie die Seitenpartie ein weiteres Mal, indem Sie die obere und untere Überlappung nach innen aufeinander legen. Nun liegen alle Löcher übereinander. Es entsteht eine große, nach außen gestülpte Falte.	

<p>6. Löcher vorbereiten</p> 	<p>7. Gummiband einfädeln</p> 
<p>Um das Durchfädeln des Bands zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Löcher mit der Spitze eines Stiftes zu weiten.</p>	<p>Fädeln Sie das lose Ende eines Gummibands durch alle übereinander liegenden Löcher.</p>
<p>8. Verknoten des Gummibands</p> 	<p>9. Fertige Maske</p> 
<p>Verknoten Sie das Gummiband fest um die Falzung herum (zur besseren Sichtbarkeit des Knotens hier nur lose verknotet). Wiederholen Sie die Schritte 4-8 für die andere Seite der Maske.</p>	

Hinter-Ohr-Tragevariante: Wer die Maske statt auf dem Hinterkopf hinter den Ohren tragen möchte, der findet online eine Anleitung.

Das Datenblatt steht Ihnen auf unserer Website zum Download zur Verfügung:
<https://www.dfabielefeld.de/leistungen/>

Und noch ein Hinweis zum Bausatz in eigener Sache:
 Masken, Nasenclips und Gummis werden nach Gewicht abgepackt. Dabei stellen wir mit einer positiven Toleranz sicher, dass Sie genug Material zum Zusammenbau der bestellten Masken-Anzahl bekommen. Als Folge kann es jedoch dazu kommen, dass die Anzahl der Komponenten nicht zu 100 % aufgeht und Sie einzelne Materialien übrig haben.