

# Zusammenbauanleitung für SONO MN Schutzmasken

## Anleitung für Variante mit 6 Löchern je Seite


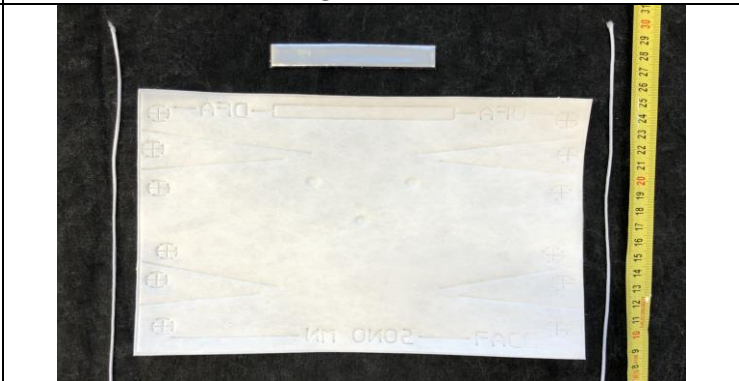
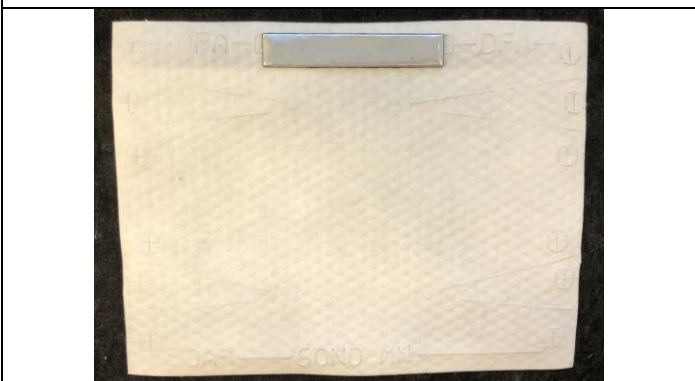
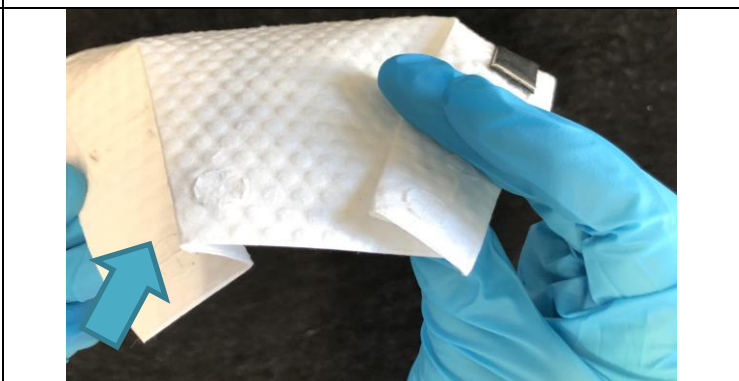


Stand: 06.05.2020


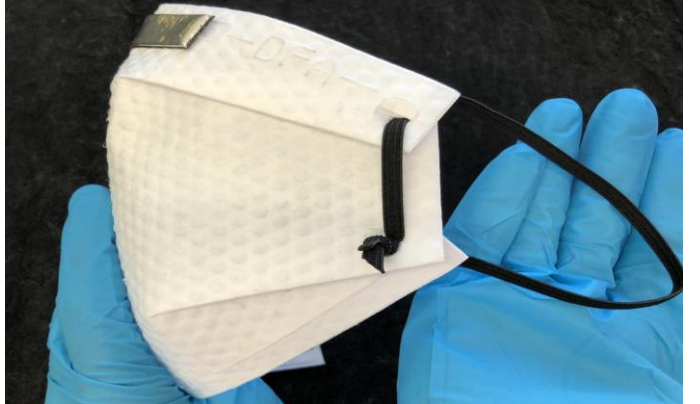
1 Karton enthält:

- Mind. 1000 Filtermedien
- Mind. 1000 Nasenclips
- Mind. 500 Gummibänder je ca. 120 cm lang

Vor dem Zusammenbau der Masken die Hände gründlich waschen und trocknen.

Der Zusammenbau erfolgt nach folgendem Schema:

1. Material Zuschneiden	2. Material bereitlegen
	
Schneiden Sie aus dem ca. 120 cm langen Gummiband mit 3 Schnitten 4 Stränge gleicher Länge.	Sie benötigen pro Maske: 1x Filtermedium, 1x Nasenklammer, 2x Gummibänder je ca. 25-30 cm
3. Nasenklammer aufkleben	4. Seitenteile falten
	
1 Nasenklammer auf das Filtermedium aufkleben. Wichtig: Noppige Fläche nach oben, SONO MN ist lesbar (nicht spiegelverkehrt). Platzierung Nasenklammer: mittig oben im rechteckig geprägten Bereich.	Falten Sie die Maske an den seitlichen Falzhilfen jeweils so, dass oben und unten 3 Lagen und Löcher übereinander liegen (Ansicht mit Nasenklammer rechts). Die längere Falzung wird auf die kürzere gelegt (innen gut erkennbar).
5. Resultat: gefaltete Seitenteile	6. Löcher vorbereiten
	
Das Bild zeigt die fertig gefaltete Seitenpartie (Ansicht mit Nasenklammer links).	Um das Durchfädeln des Bands zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Löcher mit der Spitze eines Stiftes zu weiten.

8. Gummiband einfädeln	9. Verknoten des Gummibands
	
<p>Ziehen Sie das vorbereitete Gummiband (zur besseren Sichtbarkeit hier in Schwarz) oben und unten durch die 3 Löcher. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Maske.</p>	<p>Verbinden Sie das Gummiband an den beiden offenen Enden. Hiermit erzeugen Sie eine Schlaufe für die Fixierung hinter Ihrem Ohr. Die Länge der Schlaufen sollten Sie Ihren individuellen Gesichtsmaßen anpassen.</p>

Eine Video-Anleitung für den Zusammenbau der Maske sowie das Datenblatt finden Sie auf unserer Website: <https://www.dfabielefeld.de/leistungen/>

Hinterkopf-Tragevariante: Wer die Maske statt hinter den Ohren auf dem Hinterkopf tragen möchte, der kann die zwei Gummibänder zu einem Band verknoten. Die losen Enden des Gummibands werden Links und Rechts mit den zusammengerafften Seitenteilen der Maske verknotet. Auf unserer Website finden Sie eine detaillierte Anleitung für den Zusammenbau dieser Variante.

Und noch ein Hinweis zum Bausatz in eigener Sache:

Masken, Nasenclips und Gummis werden nach Gewicht abgepackt. Dabei stellen wir mit einer positiven Toleranz sicher, dass Sie genug Material zum Zusammenbau der bestellten Masken-Anzahl bekommen. Als Folge kann es jedoch dazu kommen, dass die Anzahl der Komponenten nicht zu 100 % aufgeht und Sie einzelne Materialien übrig haben.