

# Zusammenbauanleitung für SONO MN Schutzmasken

Anleitung für Variante mit 7 Löchern je Seite

\*Variante mit wiederverwendbaren Gummibändern mit Kunststoffenden\*


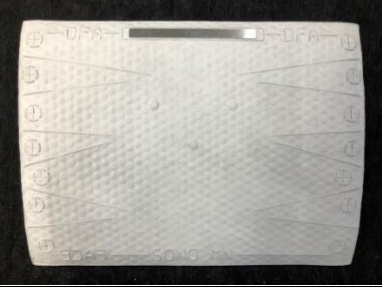
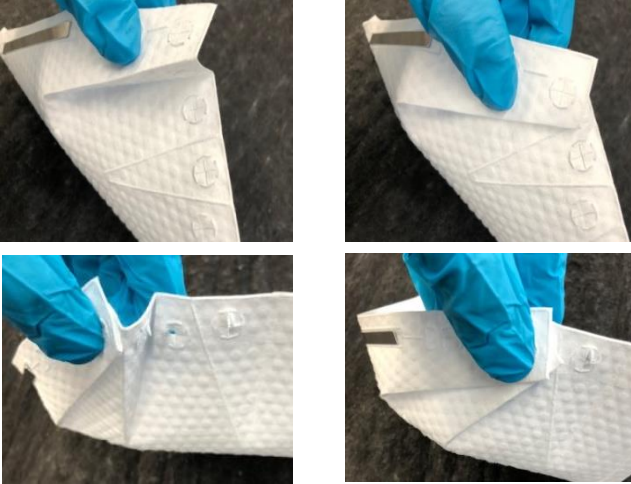
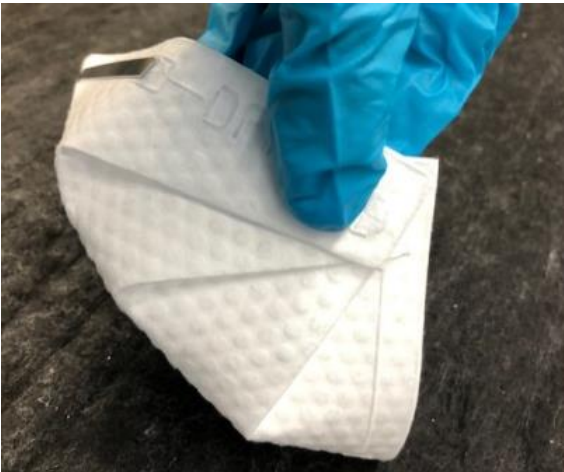
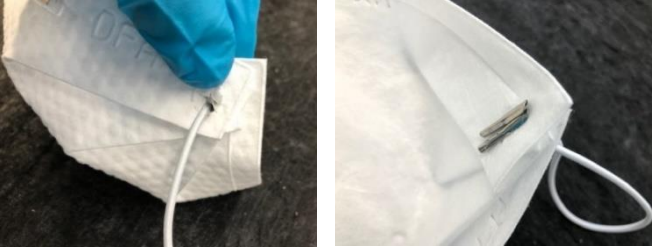
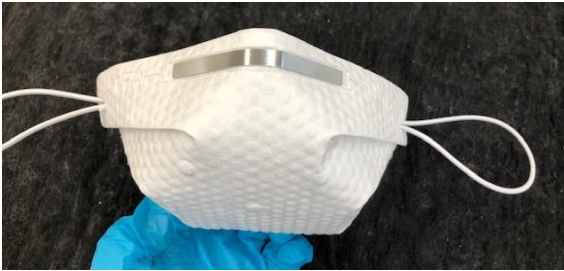
Stand: 18.05.2020



1 Karton enthält:

- Mind. 1000 Filtermedien
- Mind. 1000 Nasenclips
- Mind. 200 Gummibänder mit Kunststoffenden (Wiederverwendbare Gummibänder zur 10-fachen Verwendung!)

Vor dem Zusammenbau der Masken die Hände gründlich waschen und trocknen.


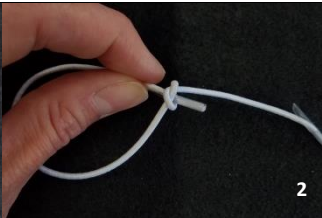
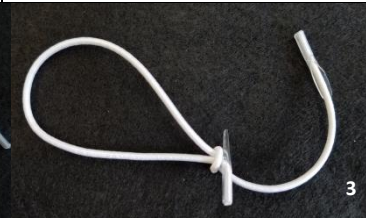

<p><b>1. Material bereitlegen</b></p> 	<p><b>2. Nasenklammer aufkleben</b></p> 
<p>Sie benötigen pro Maske: 1x Filtermedium, 1x Nasenklammer, 2x Gummibänder mit Kunststoffenden</p>	<p>1 Nasenklammer auf das Filtermedium aufkleben. Wichtig: Noppige Fläche nach oben, SONO MN ist lesbar (nicht spiegelverkehrt). Platzierung Nasenklammer: mittig oben im rechteckig geprägten Bereich.</p>
<p><b>3. Seitenteile falten</b></p> 	<p><b>4. Resultat: gefaltete Seitenteile</b></p> 
<p>Falten Sie die Maske an den seitlichen Falzhilfen jeweils so, dass alle 7 Löcher übereinander liegen. Die längere Falzung wird auf die kürzere gelegt.</p>	<p>Das Bild zeigt die fertig gefaltete Seitenpartie.</p>
<p><b>5. Gummiband einfädeln</b></p> 	<p><b>6. Resultat: fertige Maske</b></p> 
<p>Ziehen Sie beide Enden des Gummibandes durch die 7 aufeinander liegenden Löcher der gefalteten Seitenpartie. Hierdurch entsteht eine Schlaufe zur Befestigung der Maske hinter Ihrem Ohr.</p>	

## Größen-Anpassungen

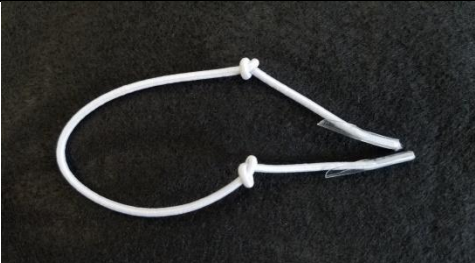

### Sitz Ihnen die Maske zu eng?

<p><b>6-Fach Faltung</b> Um die Maske zu vergrößern, sparen Sie bei der Faltung der Seitenteile das mittlere Loch aus. Hiermit verlängert sich außerdem die Ohrschleufe.</p>	<p><b>Vs. Standard 7-Fach Faltung</b> Im Vergleich zu einer 6-Fach gefalteten Maske, wird eine 7-Fach gefaltete Maske schmaler und sitzt enger.</p>
	

### Die Ohrschleufe ist für Sie zu kurz?

<p>Sie können die Ohrschleufe wie folgt verlängern oder die 6-Fach Faltung ausprobieren (siehe oben).</p>			
<p><b>Schritt 1:</b> Knüpfen Sie etwa 5 cm vom Ende des Gummibands einen lockeren Knoten.</p> <p><b>Schritt 2:</b> Fädeln Sie das Kunststoffende des längeren Gummiband-Abschnitts durch den Knoten. Ziehen Sie nun das Band gegen das Kunststoffende fest.</p>	<p><b>Schritt 3:</b> Verschieben Sie die Schleufe so, dass die gewünschte Länge erreicht wird.</p> <p><b>Schritt 4:</b> Verbinden Sie Ohrschleufe und Filtermedium, indem Sie das freie Ende des Gummibands durch die gefalteten Seitenteile führen.</p>		
 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>

### Die Ohrschleufe ist für Sie zu lang?

<p>Die Ohrschleufe können Sie mittels beliebig vieler Knoten verkürzen.</p>	
<p><b>Variante 1:</b> Knüpfen Sie einen oder mehrere Knoten in das Gummiband.</p>	<p><b>Variante 2:</b> Verknoten Sie das doppelt gelegte Gummiband.</p>
	

Eine [Video-Anleitung](#) für den Zusammenbau der Maske, Größenanpassungen sowie das [Datenblatt](#) finden Sie auf unserer Website: <https://www.dfabielefeld.de/leistungen/>

Und noch ein Hinweis zum Bausatz in eigener Sache:

Masken, Nasenclips und Gummis werden nach Gewicht abgepackt. Dabei stellen wir mit einer positiven Toleranz sicher, dass Sie genug Material zum Zusammenbau der bestellten Masken-Anzahl bekommen. Als Folge kann es jedoch dazu kommen, dass die Anzahl der Komponenten nicht zu 100 % aufgeht und Sie einzelne Materialien übrig haben.

Dr. Freist Automotive Bielefeld GmbH  
Ernst-Graebe-Str. 10  
33611 Bielefeld  
Telefon: + 49 521 5240-5  
Telefax: + 49 521 5240-442

Geschäftsführer:  
Dr. Christoph Freist  
Dr. Ralf Dopheide  
Bernd Wahner

Sitz: Bielefeld  
Handelsregister Bielefeld  
HRB 39951  
Steuer-Nr. 305/5815/1864  
UST-ID-Nr. DE815176109

Bankhaus Lampe  
Konto-Nr. 418358  
BLZ 48020151  
DE79 4802 0151 0000 4183 58  
SWIFT CODE:  
LAMPDEDDXXX

Deutsche Bank, Bielefeld  
Konto-Nr: 022679500  
BLZ: 48070020  
DE42 4807 0020 0022 6795 00  
SWIFT CODE:  
DEUTDE33XXX